

**Allflex - DNA korvamerkin kiinnittäminen
(päämerkki, viivakoodillinen)**

**Allflex - Fastsättning av DNA öronmärke
(huvudmärke, med sträckkod)**



1. DNA-korvamerkit kiinnitetään keltamustilla erikoispihdeillä. Korvamerkin lävistysosan (päämerkin koiraspuolinen vastakappale) asettaminen pihteihin.

Använd gula DNA-tången för att fästa DNA-öronmärken.
Fastsättning av handelen i tången.



2. Paina laitteen sivussa olevaa läppää ja työnnä valkoinen sylinteri aukkoon, niin että lävistysosa osoittaa alaspäin.

Tryck på fliken på sidan av tången och tryck den vita cylindern till öppningen så att handelen pekar nedåt.



3. Korvamerkin reikäosan (päämerkin naaraspuolinen, viivakoodillinen vastakappale) asettaminen pihteihin. Paina jousitettua pidikettä ja työnnä valkoinen reikäosa sisään, niin että vihreä muovi on ylöspäin.

Fastsättning av handelen: Tryck på den fjäderbelastade klämman och skjut öronmärkets vita håldel i, så att den tomma sidan och gröna plasten är uppåt.



4. Korvamerkin kiinnittäminen. Aseta merkki korvaterän ja pään puolella välissä olevien rustojen väliin.

Rätt ställe att fästa märket på. Placera märket mellan brosken, halvvägs mellan öronspetsen och huvudet.



5. Aseta pihdit niin, että reikäosa (viivakoodillinen merkki) jää korvan sisäpuolelle. Purista pihtejä nopeasti ja voimakkaasti yhteen. Metallilävistin jää pihteihin kiinni.

Sätt tången så att håldelen (märket med streckkod) är på insidan av örat. Kläm åt snabbt och kraftigt. Det blir kvar en metalldel på tången.



6. Koepalan talteenotto. Paina pieni koeputki käsin metallilävistimeen kiinni.

Provtagning : Läggs fast provröret på spetsen som lämnat fast i tången.
Tryck kraftigt, antingen med handen, eller lätt med öronmärkstången.



7. Paina laitteen sivussa olevaa läppää ja irrota koepalapatuki pihdeistä.

Lösgör provröret från tången genom att trycka på metallklaffen på sidan av tången.





8. Koepala on valmis laboratorioon lähetettäväksi. Provröret är färdigt att skickas.

9. Jotta haava arpeutuisi paremmin, liikuttele korvamerkin molempia osia edes takaisin. Desinfioi haavaa tarvittaessa.

Flytta på öronmärkets båda delar fram och tillbaka för att såret skall läka bättre. Desinficera vid behov.



Apumerkin (tavallinen tai eMerkki) kiinnittäminen

Huom! Tavalliset apumerkit voi kiinnittää kaikilla Allflexin pihdeillä, mutta eMerkki apumerkit voi kiinnittää vain Allflexin punaisilla pihdeillä tai näillä keltamustilla pihdeillä.

Fastsättning av hjälpmärke (eMärke eller visuellt). OBS! eMärket kan endast fästas med Allflex röda tång eller med dessa gulsvarta.



1. Pihtipiikin asentaminen. Vedä pihtipiikki irti pihtien kahvan sisäpuolelta. Paina sivussa olevaa läppää ja aseta piikki aukkoon.

För att sätta fast ett normalt visuellt märke, dra ut spetsen från insidan av tångens handtag. Spetsen fästs i tången genom att trycka på fliken på sidan av tången och sedan trycka spetsen i hålet.



2. Aseta korvamerkin lävistysosa (koiraspuolinen vastakappale) pihtipiikkiin.

Sätt öronmärkets handel på spetsen.



3. Korvamerkin reikäosan (musta nappula, naaraspuolinen) asettaminen. Paina jousitettua pidikettä ja työnnä vastakappale paikoilleen.

Huom! Jos sinulla on käytössäsi eMerkit pitää reikäosan asettamista varten pihdeistä irrottaa muovinen lisäosa jousitetun pidikkeen alta. E-merkin kirjoitetulla puolella on kohouma. Aseta merkki niin, että kohouma on asettunut ulospäin pihtien aukosta.

Tryck på den fjäderbelastade klämman för att fästa svarta hondelen.

Obs! Om du använder e-Märken, måste man ta bort plastdelen under den fjäderbelastade klämman. Det elektroniska märket har en "buckla" på den skrivna sidan. Placera märket så att "bucklan" är vänd utåt från tångens gap och den blanka sidan av märket är uppåt.



Korvamerkin kiinnittäminen. Katso kohdat 4 ja 5.
Haavanparantumisen optimointi. Katso kohta 9.

För att fästa öronmärket, se punkt 4 och 5.
Såråkningens optimering, se punkt 9.