


TEGO-VERINÄYTTEEN OTTAMINEN

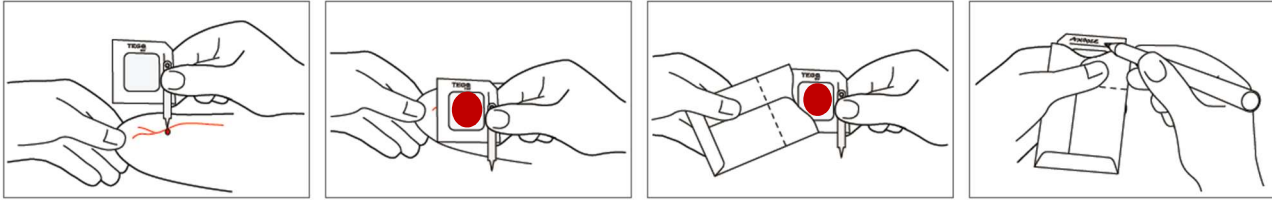

1. Pidä lansettia ja imupaperia kuvan osoittamalla tavalla. Pistä lansetilla reikä korvan takapinnalla näkyvään verisuoneen. Mikäli verisuoni näkyy heikosti, hiero korvaa ensin lämpimäksi. Voit käyttää myös taskulamppua läpivalaisuun.
2. Paina imupaperi pistokohtaan ja imeytä reilusti verta imupaperiin. Veri hyytyy nopeasti, joten voit joutua hieman "lypsämään" sitä suonesta. **Näyte on kelvollinen, kun verta on vähintään euron kolikon kokoisella alueella läpi asti imeytyneenä.**
3. Heiluttele imupaperia hetki ilmassa ennen kuin laitat sen säilytuspussiin.
4. Kirjoita syntymätunnus imupaperiarkin reunaan ID-riville.
5. Taita pussin suu kiinni. Pussia ei saa sulkea teipillä. Älä laita näytettä muovipussiin ettei se homehdu.
6. Lähetä näytteet tavallisessa kirjekuoressa tai lähetyslaatikossa Fabalabiin.

TÄRKEÄÄ:

- Käytä lansettia vain yhdelle eläimelle. Lansetin käyttäminen useaan kertaan voi aiheuttaa tulehdusvaaran, ja pienikin pisara toisen eläimen verta voi sotkea testitulokset.
- Laita käytetyt lansetit esimerkiksi vanhasta muovisesta hillopurkista tehtyyn säilytysrasiaan. Älä jätä lasten tai eläinten ulottuville! Jotkut apteekit vastaanottavat neuloja hävitettäväksi.
- Tarkista ennen näytteen lähettämistä, että näytekorttiin kirjoitettu syntymätunnus vastaa viivakooditarrassa olevaa syntymätunnusta.
- Tavallisessa C5-kokoisessa kirjekuoressa voi lähettää enintään 20 TEGO-näytettä.
- Näytteet voi säilyttää huoneenlämmössä.
- **HUOM! Jos eläin on kaksonen, testin voi tehdä ainoastaan karvatuppi- tai kudospäyttestä.**

Genomitesti laskutetaan, kun näyte saapuu Fabalabiin. Lisätietoa genomitestaamisesta, mm. genomitulosten aikataulu ja video näytteenotosta on löytyvät osoitteesta www.faba.fi/genomitesti.

Tiedustelut, tilaukset ja näytteiden lähetys:

Fabalab-palvelut
PL 95
15871 HOLLOLA

Puh. 043 825 1003
fabalab@faba.fi
www.faba.fi