




KARVATUPPINÄYTTEEN OTTAMINEN GENOMIMÄÄRITYSTÄ VARTEN

Näytteenottoon tarvitset tarralappuja (esim. viestilappuja) ja pieniä suljettavia muovipusseja. **Näyte tulee ottaa eläimen häntätupsusta**, koska karvatupet (karvanjuuret) ovat siellä suurimmat.

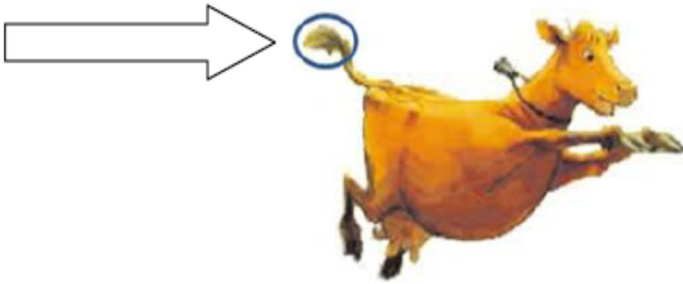

Käytä suojakäsineitä, mikäli mahdollista. Voit nyppiä karvat myös paljain käsin. Pese kätesi ennen näytteenottoa ja varsinkin silloin, jos otat näytteitä useammasta eri eläimestä.

1. Tarkista, että eläimen syntymätunnus vastaa viivakooditarrassa olevaa syntymätunnusta.
2. Nypi eläimestä 30-50 paksua häntäjouhta karvatuppineen.
3. Aseta häntäjouhet tarralapun liimapintaan niin, että karvatupet jäävät pari senttiä paperin reunan ulkopuolelle.
4. Taita lappu kaksin kerroin liimapinnat vastakkain.
5. Laita tarralappu karvoineen muovipussiin ja sulje pussi huolellisesti.
6. Lähetä näyte palautuskuoressa mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen.

Genomitesti laskutetaan, kun näyte saapuu Fabalabiin. Lisätietoa genomitestaamisesta, mm. genomitulosten aikataulu ja video näytteenotosta on löytyvät osoitteesta www.faba.fi/genomitesti.

Tiedustelut, tilaukset ja näytteiden lähetys:

Fabalab-palvelut
PL 95
15871 HOLLOLA

Puh. 043 825 1003
fabalab@faba.fi
www.faba.fi